

Thinking

VIP
inserto[®]
SEAT


SEAT



2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e'l vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

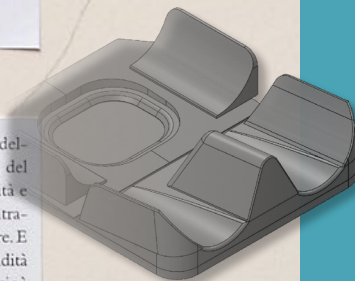

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche




Perchè Vip ?

- DISTRIBUZIONE DEI CARICHI
- CONTENIMENTO LATERALE
- SOSPENSIONE E SCARICO ISCHIO
TROCANTERICO - COCCIGEO - SACRALE



KIT STRUTTURALE
A DENSITÀ DIFFERENZIATA
MODIFICABILE

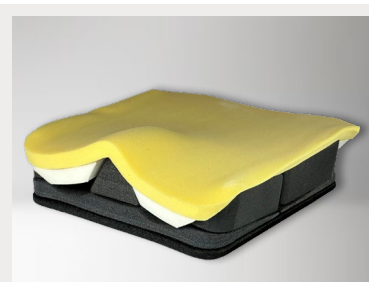

KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere



FODERA DI RIVESTIMENTO
INTERNA SFODERABILE

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'Unità Posturale bacino Inserto Seat Vip è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con moderate deformità e con una discreta necessità di contenimento e stabilizzazione posturale, in particolare:

- Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità e rotazioni pelviche, anteroversioni e retroversioni pelviche, adduzioni e abduzioni delle gambe di entità medio/grave;
- Che necessitano di un intervento di stabilizzazione e/o allineamento degli ischi;
- Che necessitano di sospensione ischiatica, trocanterica, coccigea e sacrale;
- Che sono soggetti ad un alto rischio di sviluppare piaghe da decubito;
- Che necessitano di livellamento e contenimento del sistema di relazione gambe, bacino, rachide;

L'Unità Posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

PTS Pelvic Total Support

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni Unità Posturale bacino Inserto Vip include:

- Kit strutturale a densità differenziata composto da una base piatta di costruzione e 8 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino individualmente;
- Imbottitura, lavabile con detergente neutro, composto da diversi strati di foam:
 - uno strato superiore di memory foam, per una più elevata protezione del rischio di piaghe da decubito,
 - uno strato inferiore di schiuma poliuretanicca espansa flessibile ed elastica;
- Fodera di rivestimento interna che ricopre l'imbottitura in materiale a composizione combinata PU/PES antibatterico, non citotossico, non irritante, resistente alla penetrazione di virus, antifungo, ignifugo, biocompatibile, certificato OEKO-TEX® classe I, privo di lattice, traspirante e impermeabile;
- Fodera di rivestimento esterna areata, ignifuga, antibatterica, latex free a basso rischio di irritazione per la pelle e comunemente utilizzata nei dispositivi medici.

Entrambi i rivestimenti, essendo sfoderabili, possono essere lavati in acqua tiepida con detergente neutro. Si consiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Imbottitura
- Fodera di rivestimento interna
- Fodera di rivestimento esterna


AVVERTENZE

L'Unità Posturale **Inserto Seat Vip**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Imbottitura, Rivestimento Interno e Rivestimento Esterno) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio **referibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie**.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale **Inserto Seat Vip**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione, approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è **referibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura**.

Per gli utenti ipovedenti questo può essere visualizzato in formato PDF
(con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com

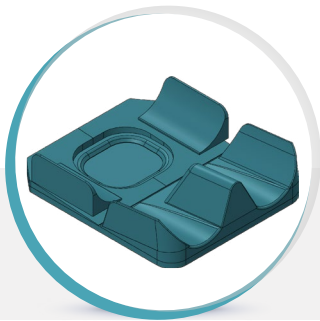

Inserto Vip

8 INSERTI MODULARI MODIFICABILI

DOPPIA FODERA ANTIBATTERICA,
IGNIFUGA, AREATA


° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO VIP	PEDIATRICO								ADULTO								MISURE (cm)	
MODELLO	3232	3236	3434	3438	3638	3642	3840	3845	4040	4045	4242	4245	4250	4545	4550	4848	4850	5050
Larghezza Effettiva (cm)	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	42	45	45	48	48	50
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	34	34	36	36	38	38	40	40	42	42	44	44	44	47	47	50	50	52
Larghezza Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	30	30	32	32	34	34	36	36	38	38	40	40	40	43	43	46	46	48
Lunghezza Effettiva (cm)	32	36	34	38	38	42	40	45	40	45	42	45	50	45	50	48	50	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	34,5	38,5	36,5	40,5	40,5	44,5	42,5	47,5	42,5	47,5	44,5	47,5	52,5	47,5	52,5	50,5	52,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con regolaz. sagomature posteriori e rimozione inserti (cm)*	29	33	31	35	35	39	37	42	37	42	39	42	47	42	47	45	47	47
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz (5) + inserti livellamento alloggiamento gambe (1)(cm)**					3,5 / 4,5		** altezze riferite ai modelli 3232 e 5050											
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz (5) + inserti contenit bacino (4)(cm)**					9 / 13		** altezze riferite ai modelli 3232 e 5050											

Peso unità posturale min/max: 0,9 kg/3 kg

Portata massima riferita al modello 5050: 150 kg

*possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

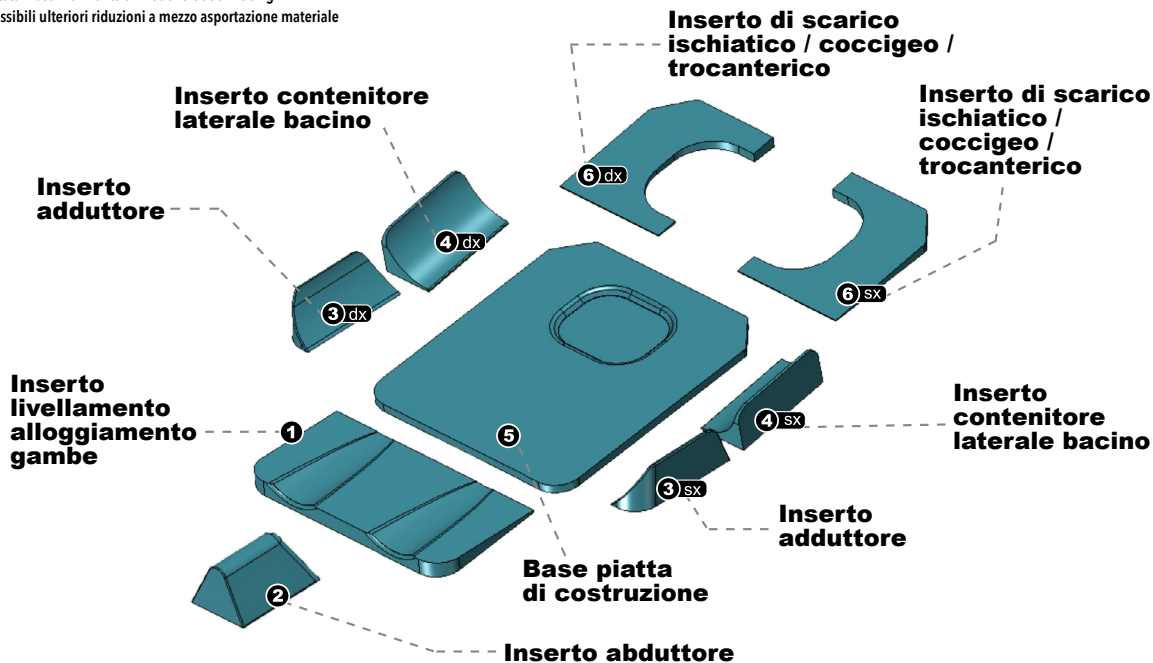


VIP


VIP
inserto[®]
SEAT

Personalizzazioni Vip


PTS
Pelvic Total
SUPPORT

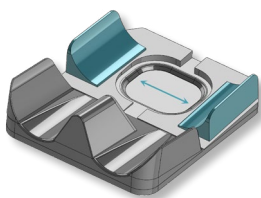


REGOLAZIONE APPOGGI
TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII

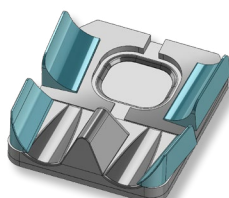


GESTIONE ADDUZIONE
FISSA

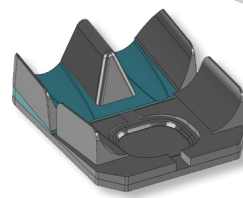


GESTIONE
ANTISCIVOLAMENTO BACINO

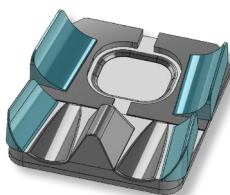


GESTIONE ABDUZIONE
FISSA

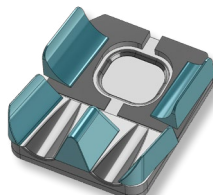

GESTIONE COLPO
DI VENTO

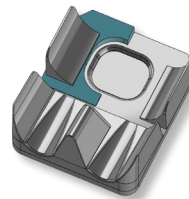

GESTIONE OBLIQUITÀ
PELVICA

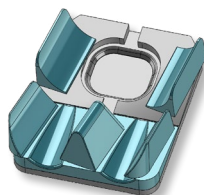

GESTIONE ROTAZIONE
BACINO

PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE
Kit di costruzione della seduta individuale

LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.





PRODOTTO DA:





Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

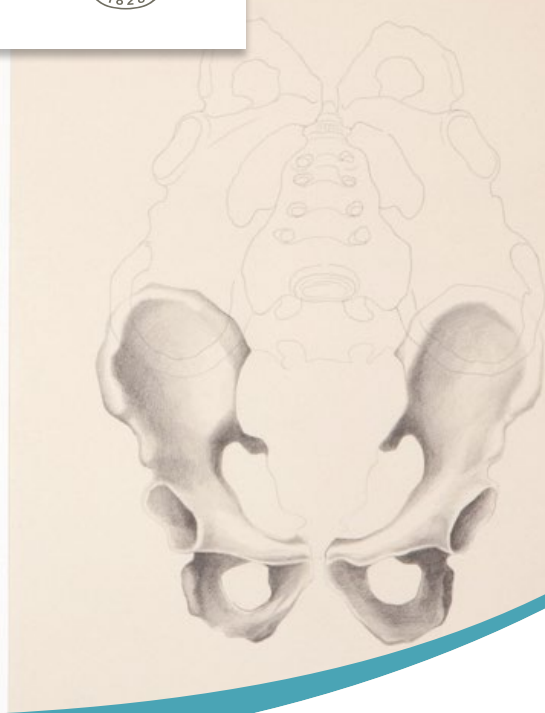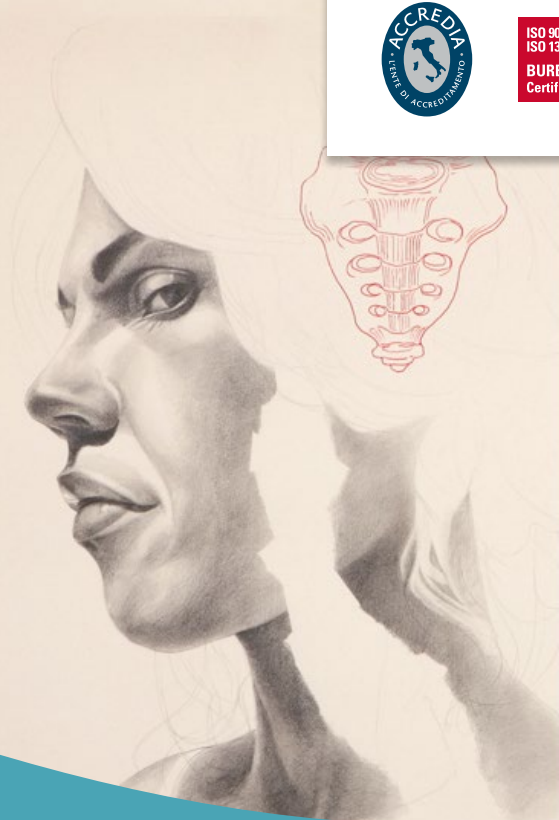

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com